

Leggere attentamente questo foglietto illustrativo di ARK Diagnostics, Inc. prima di utilizzare il controllo ARK Gabapentin Control ed attenersi scrupolosamente alle istruzioni ivi riportate. L'affidabilità dei risultati analitici è garantita soltanto se le istruzioni del foglietto illustrativo vengono seguite attentamente.

Segnalare eventuali incidenti gravi avvenuti con il dispositivo al fabbricante e all'autorità competente appropriata, secondo i casi. Una sintesi relativa alla sicurezza e alle prestazioni è disponibile tramite Eudamed (Banca dati europea dei dispositivi medici), SRN: US-MF-000023925.

## Servizio Clienti




48089 Fremont Blvd  
 Fremont, CA 94538 USA  
 Tel.: 1-877-869-2320  
 Fax: 1-510-270-6298  
 customersupport@ark-tdm.com  
 www.ark-tdm.com



EC REP

Emergo Europe  
 Westervoortsedijk 60  
 6827 AT Arnhem  
 Paesi Bassi

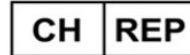

MedEnvoy Switzerland  
 Gotthardstrasse 28  
 6302 Zug  
 Svizzera

## Legenda dei simboli utilizzati

	Codice del lotto	 YYYY-MM-DD	Utilizzare entro/Data di scadenza
	Numero di catalogo		Fabbricante
	Mandatario		Marchio CE con il numero di identificazione dell'organismo notificato
	Dispositivo medico-diagnostico <i>in vitro</i>		Limiti di temperatura
	Consultare le istruzioni per l'uso		Controllo di qualità
<b>Rx Only</b>	Uso consentito esclusivamente su prescrizione		

## 1 Denominazione

**ARK<sup>TM</sup> Gabapentin Control**

## 2 Finalità d'uso

Il controllo ARK Gabapentin Control è previsto per il controllo di qualità del dosaggio ARK Gabapentin Assay.

## 3 Contenuto

Il controllo ARK Gabapentin Control è composto da una matrice di proteine sintetica con le seguenti concentrazioni di gabapentin:

REF	Descrizione del prodotto	Quantità/Volume
5025-0003-00	<b>ARK Gabapentin Control*</b> Gabapentin, tampone, sieroalbumina bovina e sodio azoturo (livello nominale)	Flaconi contagocce
	<b>BASSO</b> (2,5 µg/mL)	1 x 4 mL
	<b>MEDIO</b> (8,0 µg/mL)	1 x 4 mL
	<b>ALTO</b> (25,0 µg/mL)	1 x 4 mL

\* Per convertire i risultati di gabapentin da µg/mL a µmol/L, moltiplicare µg/mL per 5,84. I livelli di gabapentin diventano rispettivamente 14,6, 46,7 e 146,0 µmol/L per i controlli a tre livelli.

Spetta a ciascun laboratorio stabilire i propri range per ogni nuovo lotto di controlli.

## 4 Avvertenze e precauzioni

- Per uso **diagnostico *in vitro***.
- Non miscelare i controlli appartenenti a numeri di lotto differenti.
- Utilizzare ciascun lotto come kit.
- I controlli contengono ≤0,09% di sodio azoturo.

## 5 Istruzioni per l'uso

- Per la descrizione della metodica e spiegazione completa del dosaggio di gabapentin, fare riferimento al foglietto illustrativo di ARK Gabapentin Assay.
- I controlli sono pronti per l'uso. Miscelare ciascun livello capovolgendo delicatamente il flacone prima della dispensazione.
- Dispensare un volume sufficiente (~40 µL/goccia) nelle singole coppette di campione per ciascun livello. Fare riferimento ai requisiti specifici dello strumento per il volume dei campioni. Richiudere ermeticamente i contenitori originali.
- Conservare a 2-8°C. Utilizzare entro 12 mesi dall'apertura e comunque non oltre la data di scadenza.

## 6 Limiti della procedura

Risultati accurati e riproducibili dipendono da un corretto funzionamento degli strumenti, dei reagenti, calibratori e controlli, dalla conservazione del prodotto secondo le indicazioni e dall'osservanza delle norme di buona tecnica di laboratorio.

## 7 Marchi commerciali

**ARK**<sup>TM</sup> è un marchio commerciale di **ARK** Diagnostics, Inc.  
Altri marchi o nomi di prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari.



**ARK Diagnostics, Inc.**  
**Fremont, CA 94538 USA**

Revisione marzo 2025  
1600-0184-00IT Rev 07