

ARK™ Levetiracetāma kontrole

ARK Diagnostics, Inc. lietošanas instrukcija ARK Levetiracetāma kontrole pirms lietošanas rūpīgi jāizlasa. Attiecīgi ievērot lietošanas instrukciju. Testa rezultātu ticamību nevar garantēt, ja ir kādas novirzes no šajā lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem.

Klientu serviss













48089 Fremont Blvd
Fremonta, CA 94538 ASV
Tel: 1-877-869-2320
Fax: 1-510-270-6298
customersupport@ark-tdm.com
www.ark-tdm.com



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP Hāga
Nīderlande

Izmantotie simboli

	Partijas numurs	 GGGG-MM-DD	Izlietot līdz/ Derīguma termiņš
	Kataloga numurs		Ražotājs
	Pilnvarotais pārstāvis		CE marķējums
	In Vitro diagnostika Medicīnas ierīce		Temperatūras ierobežojumi
	Skatīt lietošanas instrukciju		Kvalitātes kontrole
Rx Only	Lietošana tikai ar recepti		

1. Nosaukums

ARK™ Levetiracetāma kontrole

2. Paredzētais lietojums

ARK Levetiracetāma kontrole ir paredzēta ARK Levetiracetāma testa kvalitātes kontrolei,  5024-0001-00.

3. Saturs

ARK Levetiracetāma kontrole sastāv no sintētiskas proteīna matricas ar sekojošām levetiracetāma koncentrācijām:

REF	Produkta apraksts	Daudzums/Tilpums
5024-0003-00	ARK Levetiracetāma kontrole Lamotrigīns, buferšķīdums, liellopa seruma albumīns, un konservanti (nomināls daudzums)	Pudelīte ar pipeti
	ZEMS (7.5 µg/mL)	1 X 4 mL
	VIDĒJS (30.0 µg/mL)	1 X 4 mL
	AUGSTS (75.0 µg/mL)	1 X 4 mL

Katrai laboratorijai jānosaka savi diapazoni katrai jaunai kontroļu partijai.

4. Bīdīnājumi un ierobežojumi

- Lietošana In Vitro diagnostikai.
- Nejaukt kontroles ar dažādiem partijās numuriem.
- Katru partiju lietot kā komplektu.

5. Lietošanas instrukcija

- Lai iegūtu pilnīgu levetiracetāma testa kopsavilkumu un skaidrojumu, skatīt ARK Levetiracetāma testa lietošanas instrukciju.
- Kontroles ir gatavas lietošanai. Pirms lietošanas maigi samaisiet katru līmeni.
- Katram līmenim izspiest pietiekamu daudzumu (~40µL/piliens) atsevišķos paraugu traukos. Skatiet instrumentam raksturīgās parauga tilpuma prasības. Vāciņus novietot to oriģinālajos konteineros un turiet cieši.
- Uzglabāt 2–8°C temperatūrā. Lietot pirms derīguma termiņa beigām.

6. Procedūras ierobežojumi

Precīzi un atkārtojami rezultāti ir atkarīgi no pareizi funkcionējošiem instrumentiem, reaģentiem, kalibratoriem, kontrolēm, produkta atbilstošas uzglabāšanas un piemērotas laboratorijas tehnikas.

7. Preču zīmes

ARK™ ir preču zīme ARK Diagnostics, Inc.

Citi zīmolu vai produktu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes.